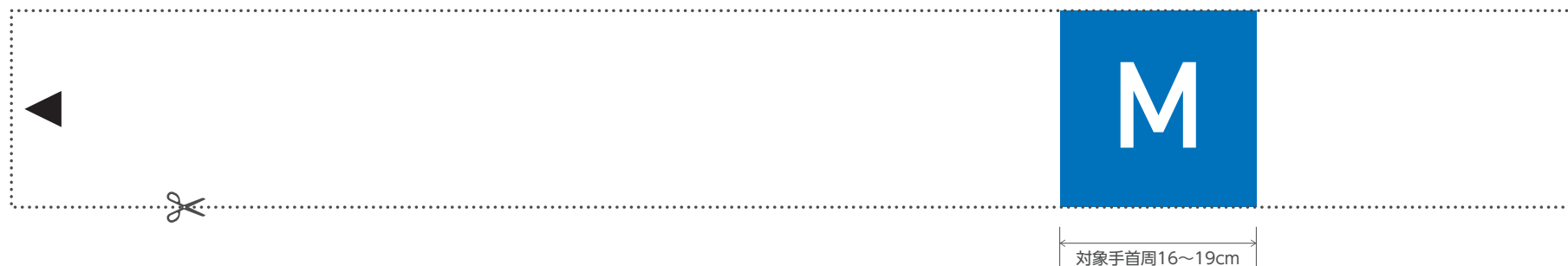


## HeartGuide™

Wearable Blood Pressure Monitor

HCR-6900T-M

HeartGuide サイジングツール 印刷時の設定は「実際のサイズ」にして印刷してください。

1


設定を「実際のサイズ」にして印刷してください。100円硬貨を下記の青い円に置いて、一致するか確認してください。一致したら、サイジングツールを点線に沿って切り抜いてください。



もし100円硬貨と青い円の大きさが一致しない場合、印刷設定を確認して、再度印刷してください。


2

サイジングツールを図のように手首と手のひらの境目から指2本分(2.5~3センチ)下の位置に巻いてください。このとき▲印が表に来るようにしてください。

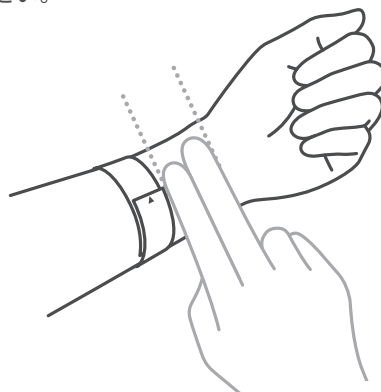

3

サイジングツールがぴったり手首に巻かれていることを確認してください。▲印が青色の範囲内であれば、血圧測定ができます。

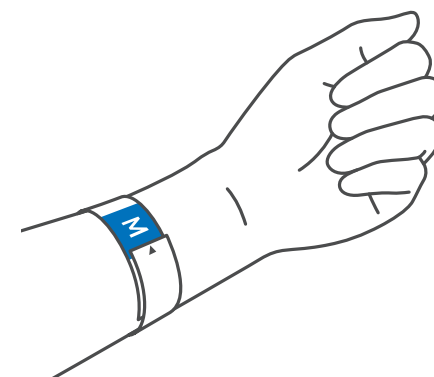

青色の外になる方は、対象手首周の範囲外になるため、正確な血圧測定ができません。