


リズムを知って、美も健康もちょうどよく。

女の人のカラダは、女性ホルモンの働きにより、  
実に多くのことが変化します。

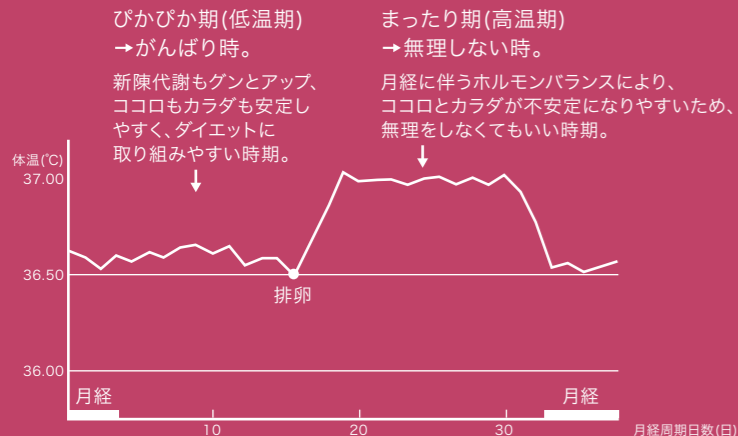

まずは基礎体温をつけてみましょう。

きちんと体調がわかれば、ココロもカラダも平和な日々へ。

### 仕様

●販売名…オムロン 婦人用電子体温計 MC-652LC ●医療機器認証番号…223AGBZX00261A01 ●メーカー希望小売価格:オープン価格 ●類別…  
機械器具 16体温計 ●一般的名称…電子体温計 ●医療機器分類…管理医療機器 ●電源電圧…DC 3V(リチウム電池CR2032×1個) ●電池寿命…約9  
カ月\*(室温23°C、1日1回/5分検温、1日1回データ転送をおこなった場合) ●感温部…サーミスタ ●測定方式…予測・実測(ピークホールド方式) ●体温  
表示…4桁+°C表示、0.01°Cごと ●通信方式…NFC-F(ISO/IEC 18092準拠)、Bluetooth®Version 4.0(Low Energy support) ●Bluetooth®通信  
距離…約10m\* ●測定精度…±0.05°C(35.00~38.00°C)±0.10°C(32.00~34.99°C、38.01~42.00°C)(標準室温23°Cにて、恒温水槽で実測測定し  
た場合) ●測温範囲…32.00~42.00°C ●使用環境温湿度…周囲温度+10~+40°C、相対湿度:30~85% RH ●保管環境温湿度…周囲温度:20~  
+60°C、相対湿度:10~95% RH ●本体質量…約33g(収納ケース、電池含む) ●外形寸法…39(幅)×103(長さ)×16(厚さ)mm ●付属品…お試し用電  
池(リチウム電池CR2032×1個)、スタートアップガイド、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書・EMC技術資料  
\*通信距離、電池寿命は通信機器間の距離や障害物、電波状況、お使いの機器の使用状況などにより変化します。また、電波状況により通信が切断される  
場合があります。

●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、オムロンヘルスケア(株)は、これらのマークをライセンスに基  
づいて使用しています。●iPhoneはApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。●Androidは  
Google Inc.の商標または登録商標です。



MC-652LC-W(ホワイト)



MC-652LC-BW(ブラウン)



MC-652LC-PK(ピンク)

### ▲安全に関するご注意

●検温結果の自己判断はしないでください。症状の悪化につながる可能性があります。治療は医師の指導に従ってください。●人の検温以外に使用しないでく  
ださい。●本商品は口中用の体温計です。それ以外(わきや耳など)で検温しないでください。正しい検温ができません。耳などを傷つける原因になります。  
●乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、お子様だけでのご使用はさせていただきます。  
※ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

健康サポートサービス **サポートデスク** 修理・商品に関するお問い合わせ / 別売品・消耗品のお求めは  
に関するお問い合わせ **オムロンお客様サービスセンター**

<http://wellnesslink.jp/support/>

〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370

TEL 0120-30-6606 ※受付時間(祝日を除く)月~金9:00~19:00

FAX 0120-10-1625 ※都合によりお休みをいただいたり、受付時間  
を変更させていただいたりする場合があります。  
※ダイヤルは正確におかけください。

お問い合わせ、ご用金は…

製造販売元 **オムロンヘルスケア株式会社** 〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地 <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

DA258 ① VM ④ 149

©OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 2014. All Rights Reserved.

OMRON



基礎体温を  
測ってみましょう。  
オムロン 婦人用電子体温計 MC-652LC



All for Healthcare

朝10秒で  
わかる  
わたしリズム。



わたしリズムを知るための  
スマートな体温計。



毎朝の  
検温時間  
わずか**10秒!**

※予測検温(平均)10秒、実測検温約5分

口にくわえてから、たったの10秒で検温完了。  
うっかり二度寝するヒマもないほどの速さです。

なぜ10秒で測れるの?

平均10秒の予測検温。  
検温開始から検出した体温の変化のデータを  
独自の分析・演算技術で高速処理し、  
実測では約5分かかるところを、  
平均10秒で予測します。



LEDランプで  
通信状況がわかる!

iPhone  
& Android対応



アプリでお知らせ  
排卵日/月経日

あなたのリズムをくわしくチェック  
MC-652LC専用アプリ「リズムノート」を使えば、  
いつでもあなただけのリズムチェックができます。  
さらに次の排卵推定日/月経開始推定日の  
お知らせも届きます。



コンパクト&  
スマートデザイン

これが婦人体温計?!と驚く  
スタイリッシュなデザイン。  
ベッドサイドにさりげなく置いてもおしゃれ。  
化粧ポーチにすっぽり納まるから、  
旅行や出張にも気軽に持っていきます。



見た目も機能もスタイリッシュ

- ケースの出し入れで電源ON/OFF
- 口にくわえやすいミニフラットセンサ
- 暗い場所でも見やすいバックライト液晶
- 選べる3色のカラーバリエーション

アラーム付きだから  
測定を忘れない!

3種類(小・中・大)の音量が選べます。

※設定は専用アプリから変更できます。



スマートフォン&  
PCからかんたん  
リズムチェック

スマートフォンやPCでかんたんにデータ転送で  
とっても便利にデータが残せます。

※パソコンでの登録には別売の「オムロンUSB通信トレイ(HHX-IT4)」が必要です。  
※USB通信トレイ(型式:HHX-IT2およびHHX-IT3)はMC-652LCに対応していません。

omron 式美人



対応スマートフォン、  
パソコンの推奨環境  
については、次のウェブサイト  
で最新の情報をご確認ください。

<http://wlm.jp/>