

OMRON

オムロン 活動量計 HJA-700T アクティブシフト エッジ

Active Shift **EDGE**

取扱説明書



オムロンの商品をお買い上げいただき、
ありがとうございました。

安全に正しくお使いいただくために、
本書をお読みください。

※本書に記載しているイラストはイメージ図です。

All for Healthcare

健康サポートサービス
WellnessLINK[®]

4015927-9A HJA-700T

目次

はじめに

Active Shift EDGE の使いかた	3
安全上のご注意	8
各部の名前と付属品	15

設定する

iPhone で設定する	16
充電する	17

使用する

装着する	22
活動を測定する	23
お知らせランプについて	27
測定データを見る	28
アプリと通信する	31
通信を OFF/ON にする	32
本体をリセットする	34

困ったときに

廃棄について	35
お手入れと保管	38
おかしいな?と思ったら	39
別売品について	45
仕様	46
お問い合わせ	48

Active Shift EDGE の使いかた

Active Shift EDGE は、このような流れで使います。

1 設定する

健康サポートサービスのサイトで「Active Shift」アプリをダウンロードし、iPhone で設定します。

(→ 16 ページ)

「健康サポートサービスについて」(→ 7 ページ)



2 測定する

本体を装着し、日々の活動からあなたの活動を測定します。(→ 22 ページ)



3 測定データを見る

測定データを確認します。
(→ 28 ページ)




重要 ✓

- ・「Active Shift EDGE」はiPhone専用です。
- ・「Active Shift EDGE」、「Active Shift」アプリは日本国内専用です。


Active Shift EDGE について

あなたの活動から自動算出される日々の目標を達成していくと自然とアクティブになれます。

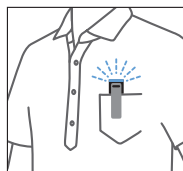


ランプが光ってお知らせ あなたの活動状況を本体で確認

お知らせランプの光と画面に表示されるメッセージであなたの活動状況や本体の状態がわかります。

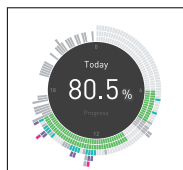

アプリで詳細な活動状況をチェック

アプリで1日の活動状況と前日の活動を比較できます。週間の目標の進捗状況を詳しく振り返ることができます。

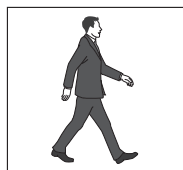

あなたの活動から目標を自動算出 日々の目標を達成していくと 自然とアクティブになれる

あなたの活動の量と質を週単位(日～土)で総合的に判断し、あなたの Active Lv (アクティブレベル) を自動算出します。

指標について

基礎代謝とは

体温維持や心臓を動かすなど、生命維持に必要なエネルギー消費のことです。24 時間じっとしていても、基礎代謝に相当するカロリーが消費されます。

METs (メッツ) とは

身体活動の強さを、安静時の何倍に相当するかで表す単位です。

METs のめやす

デスクワーク	1.3METs
普通歩行 (約 67m/分)	3.0METs
早歩き (約 93m/分)	4.3METs
ジョギング	7.0METs
階段上り	8.8METs

【METs の数値・日本語訳出典】

独立行政法人 国立健康・栄養研究所：改訂版『身体活動のメッツ (METs) 表』

(2012 年 4 月 11 日改訂) 調べ

消費するカロリーについて

活動カロリー

体を動かして消費した
エネルギー

+

基礎代謝

生命維持に必要な
エネルギー

||

総消費カロリー

その日に消費した
エネルギーの合計

活動カロリーのめやす

身長 170cm、体重 70kg、年齢 40 才の男性の場合の例

- | | | |
|------------------|------|---------|
| ・ デスクワーク | 30 分 | 23kcal |
| ・ 普通歩行 (約 67m/分) | 30 分 | 78kcal |
| ・ 早歩き (約 93m/分) | 30 分 | 126kcal |
| ・ ジョギング | 30 分 | 225kcal |
| ・ 階段上り | 30 分 | 291kcal |

健康サポートサービスについて

健康サポートサービスは、からだの記録や健康管理のためのサービスです。あなたが望む「からだ」へ近づくように、あなたをサポートをします。

健康サポートサービスご利用の注意点

- 健康サポートサービスをご利用いただくためには、メールアドレスの登録が必要です。
- アプリで転送されたデータはサーバーに保管されます。
※お使いの iPhone には保存されません。
- 機器登録できるのは活動量計・歩数計・歩行姿勢計のいずれか 1 台のみです。
- iPhone の対応機種は次のサイトでご確認ください。

<http://wlm.jp/>



- **Bluetooth®** のワードマークは、**Bluetooth SIG, Inc.** が所有する登録商標であり、オムロンヘルスケア（株）は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- iPhone は Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- ウェブサイト・アプリの仕様および本書に記載されている内容は、予告なしに変更する場合があります。

安全上のご注意

安全にご使用いただくために必ずお読みください。

- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

警告、注意について



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

* 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例



必ず守る

●記号は強制（必ず守ること）を示します。（左図は“必ず守る”）



禁止

⊘記号は禁止（してはいけないこと）を示します。（左図は“禁止”）

 警告

充電について

充電は付属の USB 充電クレードルを使用してください。AC アダプタを使用するときは別売品を使用し、別売品以外の AC アダプタは使用しないでください。「別売品について」(→ 45 ページ)

- ・ 火災や故障の原因になります。

浴室内などの水のかかる場所で、充電をしないでください。

- ・ 感電や、けがの原因になります。

USB 充電クレードルのケーブルが傷んだときは使用しないでください。

- ・ 感電やショート、発火の原因になります。

本体は廃棄のとき以外は絶対に分解しないでください。

- ・ けがや故障の原因になります。

ぬれた手で USB 充電クレードルを抜き差ししないでください。また、USB 端子を差すときに、USB 充電クレードルがぬれていないか確認してください。

- ・ 感電やけがの原因になります。



禁止



分解禁止



ぬれ手禁止

データ通信について

航空機内や病院など、無線機器の使用が禁止された区域では必ず本商品の **Bluetooth®** 通信を OFF にしてください。



必ず守る

植込み型医療機器(心臓ペースメーカーなど)の装着部位から 22cm 以内に近づけないでください。



禁止

 **警告****保管について**

乳幼児の手の届かないところに保管してください。

- ・ 万一、小さな部品を飲み込んだときは、ただちに医師に相談してください。



必ず守る

使用にあたって

画面の確認は、安全な場所でおこなってください。

- ・ 周囲の状況を確認せずに画面を見ると、事故やけがの原因になります。



必ず守る

 **注意****充電池の取り扱いについて**

本体を廃棄するときは、取り外した充電池のリード線の切断部分にセロハンテープやシールなどを貼り付けてください。

- ・ ショートにより、火災の原因になります。



必ず守る

充電池を火の中に入れてください。

- ・ 破裂してけがなどの原因になります。



禁止

充電について

1週間以上充電したまま放置しないでください。

- ・ 電池劣化や感電、漏電火災の原因になります。



禁止

 **注意****USB 充電クレードルの取り扱いについて**

お手入れするときは、USB 充電クレードルをパソコンの USB ポートから抜いてください。

- ・ 感電やけがの原因になります。

USB 充電クレードルはケーブルを引っ張らず、USB 端子部を持って抜き差ししてください。

- ・ USB 充電クレードルの断線やショートにより、火災や感電の原因になります。

USB 充電クレードルの取扱いは以下の項目に注意してください。

傷つけない／破損させない／加工しない／無理に曲げたり、引っ張らない／ねじらない／使用時は束ねない／重い物を載せない／挟み込ませない

- ・ 感電や火災、故障の原因になります。

長期間ご使用にならないときは、USB 充電クレードルをパソコンの USB ポートから抜いてください。

- ・ 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

本体／USB 充電クレードルを踏んだり落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

- ・ けがや故障の原因になります。



必ず守る



禁止

 注意

使用にあたって

減量や運動療法などをおこなうときは、自分だけで判断せず、医師か専門家の指導を受けてください。

- ・ 自己判断は健康を害することがあります。

運動中に身体に疲れや痛みを感じたら必ず休憩をとってください。もし痛みや不快が続くようであれば、直ちに運動を中止し、医師の診察を受けてください。

- ・ 身体に過度の負担をかけた運動は、事故やけがの原因になります。無理のない範囲で行ってください。

異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次のようなときは使用しないでください。

- ・ アレルギー体質の方や肌が敏感な方。
- ・ 装着部に骨折、傷、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合

本体をズボンのうしろポケットに入れしないでください。

- ・ けがをしたり、本体が破損したりする原因になります。

強い静電気や電磁波のある場所で使用しないでください。

- ・ 測定値に誤差が生じたり、故障の原因になります。

本製品は睡眠を測定する仕様ではありません。

睡眠中に装着しないでください。

- ・ 睡眠中に装着すると、本体が外れて、けがの原因になります。



必ず守る



禁止

お願い

- ・廃棄時に電池を取り外すとき以外の分解や改造をしないでください。
- ・本体／USB 充電クレードルは防水ではありません。洗ったり、ぬれた手でさわらないでください。故障の原因になります。
- ・使用済みの充電電池は、リード線の先端をセロハンテープで覆い絶縁してから、お買い上げの販売店または充電電池のリサイクル協力店へお持ちください。
- ・本体を廃棄する際は、必ず電池を取り外してから処分してください。
- ・他人に譲渡するときは、譲渡された人が必ず初期設定を行なった上でご使用ください。「iPhoneで設定する」(→ 16 ページ)

データ通信について

- ・本商品は電波法に基づく工事設計認証を受けた2.4GHz 帯小電力データ通信システムの無線設備です。本商品を改造、本体記載の認証番号を消すことはしないでください。また、廃棄時に電池を取り外すとき以外は、分解しないでください。電波法に抵触する恐れがあります。
- ・本商品を本商品と同じ周波数を使用した無線 LAN、電子レンジ、無線機器などの周辺でご使用になりますと、本商品との間で電波干渉が発生する可能性があります。電波干渉が発生した場合、使用しない機器を停止するか、本商品の使用場所を変えるなど電波干渉の生じない環境でご使用ください。
- ・電波を使用している関係上、第三者が故意または偶然に傍受する事も考えられます。機密を要する重要な事柄や人命に関わることには使用しないでください。
- ・本商品は日本国内専用です。日本国外で使用しないでください。海外で使用されると、その国の電波法に抵触する恐れがあります。


電波干渉に関するご注意

本商品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される移動体識別用構内無線局、および免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下、「他の無線局」と略す）が運用されています。

- 1 本商品を使用する前に、近くで「他の無線局」を運用していないことを確認してください。
- 2 万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに使用場所を変えるか、商品の使用を停止（電波の発信を停止）してください。
- 3 その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートデスクまでお問い合わせください。

次のマークは電波の種類と干渉距離を表しています。

使用周波数帯域：2.4GHz 帯

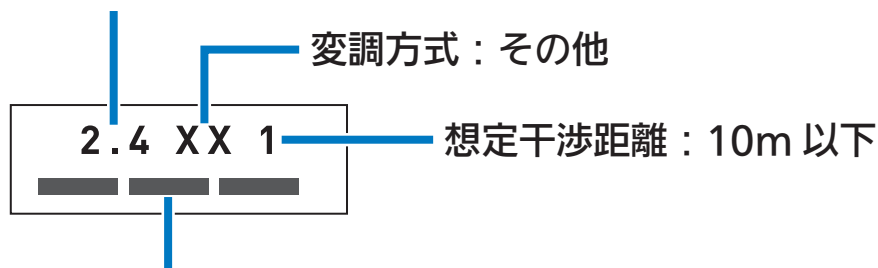


全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能です。


各部の名前と付属品

箱の中には次のものが入っています。

・ 本体

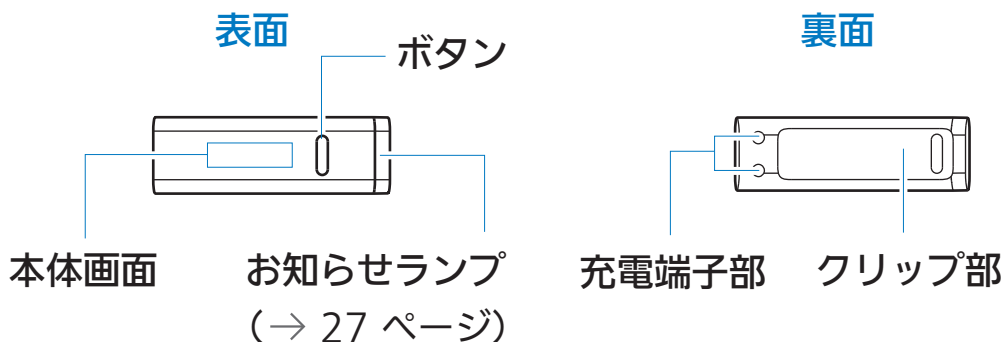

・ USB 充電クレードル

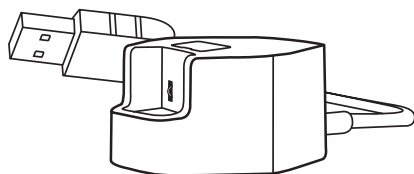

・ クイックガイド

・ 安全上のご注意 (品質保証書付き)

万一、不足のものがありましたら、オムロン お客様サービスセンター (☎ 0120-30-6606) までご連絡ください。

iPhone で設定する

はじめに iPhone で機器の設定をしてください。

※設定中に電池残量がなくなったときは充電をしてください。

「充電する」(→ 17 ページ)

1 iPhone の「設定」から Bluetooth® を「ON」にする

2 次のサイトへアクセスする

<http://wlm.jp/>



3 「サービス一覧」の「Active Shift」アプリをダウンロードする

4 アプリを起動し、ログインする

はじめてご利用いただくときは、

健康サポートサービスに会員登録をしてください。

5 機器登録をする


アプリ画面の指示に従って登録してください。

重要✓

- ・ 初期設定項目の入力を間違えると、正しく測定できない場合があります。
- ・ iPhone を機種変更したときは、手順 1 からやり直してください。

設定が完了したら「装着する」(→ 22 ページ)へ

充電する

本体画面に「Charge Battery」、電池マークが表示されたときは、すみやかに充電してください。

Charge Battery

「電池残量が少なくなった状態」



「電池残量がなくなった状態」

電池残量が少なくなっている状態でアプリと通信すると、充電を促すメッセージがアプリ画面に表示されます。




重要

- 充電中は iPhone との通信ができません。
- 電池残量がなくなった状態では測定や通信はできません。
- 電池残量がなくなったときや、長期間使用しなかったときは、必ず満充電になるまで充電してください。
- 電池がなくなっても、測定データは消えません。
- 毎日満充電したり、電池残量がない状態で保管したりすると、電池の性能や寿命を低下させる原因となります。
- 本体を繰り返し充電すると、満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。極端に短くなったら電池の寿命です。「廃棄について」(→ 35 ページ) ※電池の交換はできません。

1 本体を USB 充電クレードルに セットする

クリップ部をつまんで、本体を USB 充電クレードルにしっかりと差し込んでください。

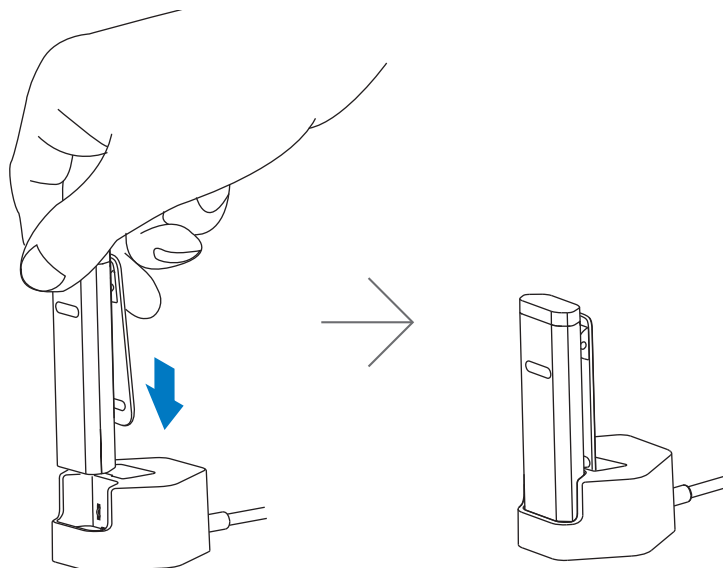

重要 ✓


充電可能な温度範囲は 5℃～35℃ですが、可能な限り 20℃前後の環境下にて充電してください。

※ 5℃に近い低温で充電した場合、20℃で充電した場合と比べて、満充電になるまでの時間が長くなります。

2 パソコンの電源が ON の状態で USB 充電クレードルの USB 端子をパソコンの USB ポートに差し込む

本体画面に電池マークが表示され、お知らせランプが点滅します。

満充電になると、お知らせランプの点滅が終了します。

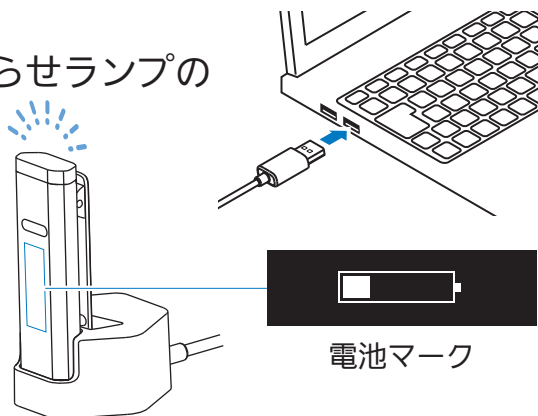


重要

電池残量により、電池マークが表示されない場合がありますが、一定時間充電し、ボタンを押すと電池マークが表示され、ランプが点滅します。


※電池マークが表示されるまでにかかる充電時間は、電池残量により異なります。

参考

- ・ AC アダプタ (別売品) でも充電できます。「別売品について」(→ 45 ページ)
- ・ USB ハブを用いて接続すると充電できない場合があります。
- ・ 満充電までの所要時間は約 3 時間です。
※時間は目安であり、充電環境や電池残量により変わります。
- ・ 満充電であることを確認するには、USB 充電クレードルにつないだ状態でボタンを押してください。満充電のときは、お知らせランプが 1 回点灯し、本体画面に電池マーク  が表示されます。

3 本体を取り外す

本体を上から押しながら、クリップ部を開きます。本体を取り外すと、お知らせランプが1回点灯し、「Charger Removed」画面が表示されます。

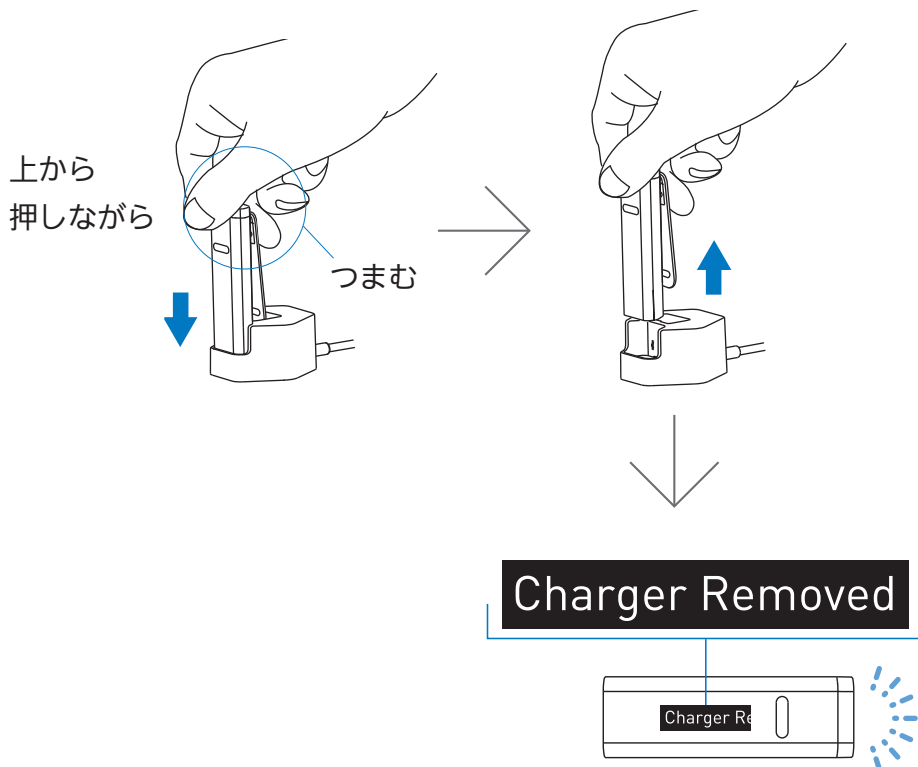

重要 ✓

本体を USB 充電クレードルから無理に引っ張って取り外さないでください。けがや故障の原因となります。

本体を取り外したら、装着して日々の活動を測定しましょう。「装着する」(→ 22 ページ)へ

電池残量がなくなった場合のお願い

充電をただけでは測定を開始しません。充電した後、一度、アプリと通信してください。


本体を USB 充電クレードルから取り外すと、お知らせランプが 1 回点灯し、「Charger Removed」画面が表示されます。

「Charger Removed」画面表示後、本体の電源が OFF になるので、ボタンを押して本体を起動してください。

本体画面に「←」が表示されたら、アプリを起動してください。


アプリ起動後、「設定」から「機器との通信確認」を選択し、「開始する」をタップしてください。

「✓ OK」画面が表示されたら、完了です。

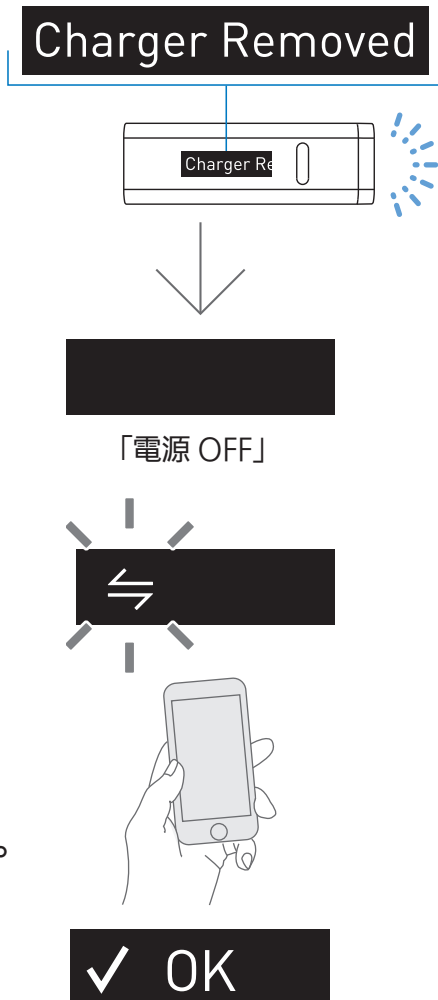


装着する

Active Shift EDGE を正しく装着しましょう。

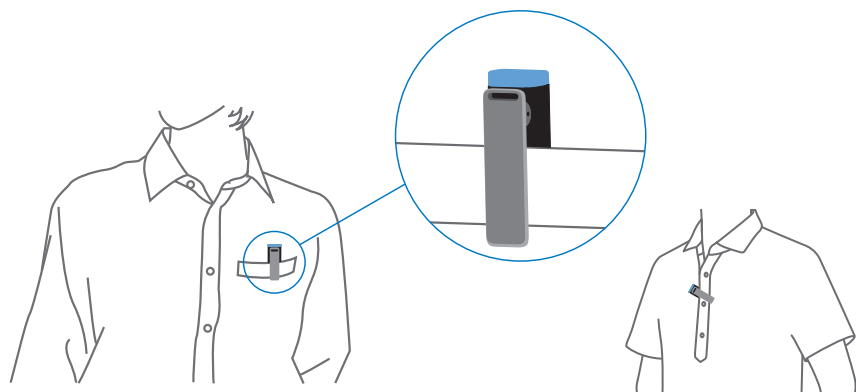

重要 ✓

精度よく測定していただくためには、上半身への装着をおすすめします。

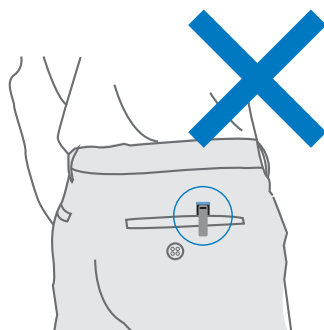

重要 ✓

本体をズボンのうしろポケットに入れたり、装着したりしないでください。けがや本体破損の原因になります。

活動を測定する

本体を装着し、日々の活動を測定してください。



歩数カウントについて


- 歩き始めは、誤カウントを防ぐため表示が増えません。一定時間の歩行があると、それまでの歩数を追加して表示します。その後、歩数は1歩ずつ増えます。
- 表示画面の数値が変わらない間も歩数のカウントはしています。

活動を正しく測定できない場合

次のようなとき、正しく測定できない場合があります。


本体が不規則に動くとき

- ・ 不規則な動きをしているバッグの中
- ・ 腰やバッグからぶら下げたとき

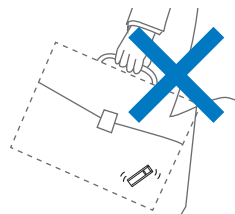

不規則な歩行をしたとき

- ・ すり足で歩く
- ・ サンドル、下駄、草履などの履物で歩く
- ・ 歩行の乱れ（混雑した街を歩く）

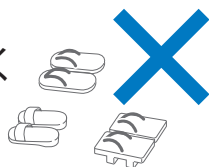

振動の多いところで使用したとき

- ・ 乗車中（自転車、自動車、電車、バスなど）の上下振動または横ゆれ



極端にゆっくり歩いたとき

その他


- ・ 立ったり、座ったりする動作
- ・ 歩行、ジョギング以外のスポーツ
- ・ 急斜面の昇り降り
- ・ 上半身を中心としたトレーニング

階段上り歩数を測定できない場合

加速度と気圧のデータより、階段歩行を識別しますが、次のようなとき、階段上り歩数を測定できない場合があります。


温度差の大きい場所を移動したとき

- ・ 氷点下の屋外と暖かい室内の出入り

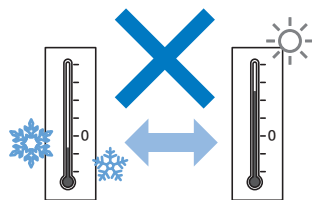

気圧差のある場所を移動したとき


- ・ 気圧を意図的に制御した場所（建物内や地下街）への出入り
- ・ 地下鉄が通過しているホーム上を移動
- ・ 歩行中に強い風が吹いたとき

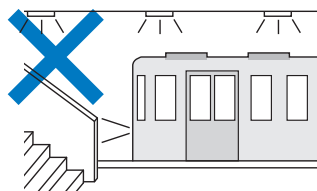

階段をゆっくり上がったとき

- ・ 足音がしないように階段をそっと上がったとき


1 段の段差が極端に低いとき

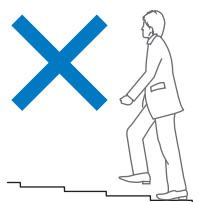

活動を測定する

階段が 10 段未満のとき

※階段の途中に踊り場があり、階段が連続して 10 段以上ないときも、階段上り歩数を測定できない場合があります。

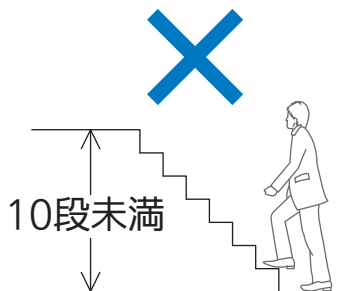


本体が不規則に動くとき

- ・ 腰やバッグからぶら下げたとき

密閉された環境にあるとき

- ・ バッグやズボン、ファスナー付きのポケットの中

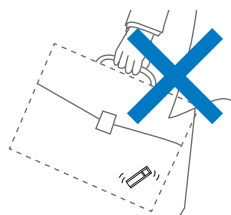

階段上り歩数が測定されにくい方へ

腕を大きく振って、太ももを上げて階段を上ってください。






お知らせランプについて

お知らせランプの点灯回数で本体の状態や活動状況をお知らせします。




参考

お知らせランプ点灯のイラストはイメージです。

点灯回数	説明
 × 1 回	本体の反応をお知らせするとき <ul style="list-style-type: none"> ・ 充電を開始したとき ・ 満充電時に USB 充電クレードルに接続した状態でボタンを押したとき ・ USB 充電クレードルから取り外したとき
 × 2 回	本体の状態をお知らせするとき <ul style="list-style-type: none"> ・ 測定データがいっぱいになったとき
 × 3 回	あなたの活動の状態をお知らせするとき <ul style="list-style-type: none"> ・ 1 日の目標達成度をお知らせするとき ・ 1 日以上、本体を使用しなかったとき ・ 1.5METs 以下の活動時間が 1 時間以上あったとき「METs とは」(→ 5 ページ)

お知らせランプ点灯後、ボタンを押すと本体の状態や活動状況に合わせたメッセージやアイコンが本体画面に表示されます。

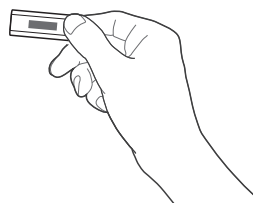

測定データを見る

ボタンを押すと、「目標達成度」・「運動強度インジケータ」画面が表示されます。


目標達成度

目標に対する達成度（1日ごと）をプログレスバーと%で表示します。

※目標はあなたの1週間の活動結果をもとに自動で算出されます。

運動強度インジケータ

あなたの直近30分間の活動強度を1分毎にグラフで表示します。

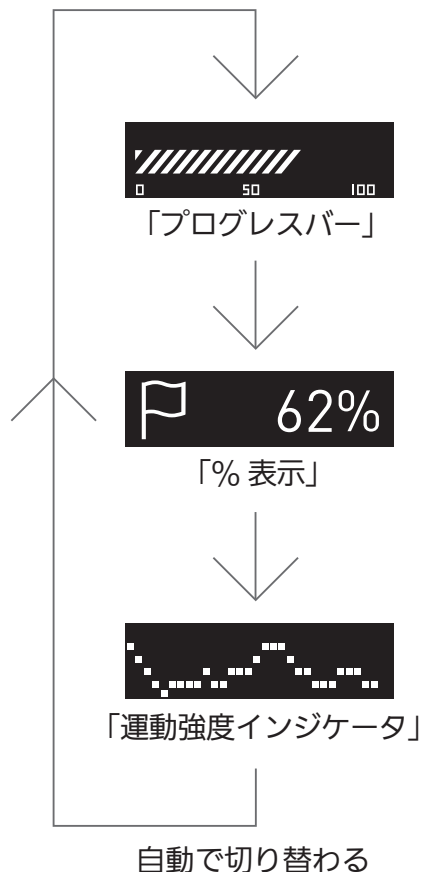

参考

「目標達成度」・「運動強度インジケータ」画面は自動で切り替わります。

「目標達成度」・「運動強度インジケータ」画面でボタンを押すと「時刻」画面が表示されます。

測定データを見る

ボタンを押すごとに次のように画面表示が切り替わります。
※画面消灯後にボタンを押すと、最後に確認した画面が表示されます。

時刻

時刻を表示します。



歩数

歩数を表示します。



早歩き歩数

4.3METs 以上の歩行やジョギングの歩数を表示します。

※階段昇降は除きます。

「METs とは」(→ 5 ページ)



総消費カロリー (1kcal 単位)

総消費カロリーを表示します。

「消費するカロリーについて」

(→ 6 ページ)



体重

アプリで設定した体重値を表示します。

※ WellnessLINK 対応の体重体組成計をご利用の方は、アプリを
経由して自動で最新の体重データが Active Shift EDGE に反映され
れます。



測定データを見る

距離 (0.1km 単位)

活動した距離を表示します。

※ジョギング、階段上り下り、早歩きが多いときは、距離に誤差が生じる場合があります。


2.4
**階段上り歩数** (10 歩単位)

階段を上った歩数を表示します。

※階段を下った歩数は平地での「歩数」としてカウントされます。「階段上り歩数」にはカウントされません。

※アプリでは「階段上り歩数」をご覧いただくことができません。


150

階段上り歩数の画面でボタンを押すと「目標達成度」・「運動強度インジケータ」画面に戻ります。

参考 


- ・ 測定データの表示は1日単位です。深夜 0:00 に表示はリセットされます。(前日の測定値はメモリに保存されます)
- ・ 過去の測定値(歩数、早歩き歩数、総消費カロリー、距離)はアプリでご覧ください。
- ・ アプリの設定で表示したい項目を ON と OFF で切り替えることができます。

省電力機能について

消費電力をおさえるため、ボタン操作をしない状態が5秒以上続くと表示が消えます。ボタンを押すと再び表示します。表示が消えた状態でも測定しています。

アプリと通信する

本体に記録されている測定データがいっぱいになったときや、アプリと通信する必要があるときは、本体画面に「Check APP」が表示されます。アプリを起動し、本体と通信してください。

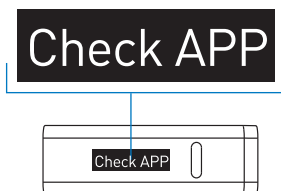

重要✔

Active Shift EDGE はアプリを起動した時点でデータ通信されます。※付属の USB 充電クレードルではデータ通信されません。

1 「Active Shift」アプリを起動する



本体画面に「≡・・・」が表示されます。



「✔ OK」画面が表示されたら、データのアップロードが完了です。



「≡ Err」画面が表示されたら、データのアップロードはできていません。

アプリを再起動し、もう一度やり直してください。

重要✔

- ・ 測定データの最大保存日数は当日を含めて 14 日分です。
- ・ 記録されている測定データが 10 日分 / 14 日分を超えた時点でボタンを押すと、「Check APP」が表示されます。
- ・ アプリと通信しないまま使用を続けると、古い測定データから順に削除されます。

通信を OFF/ON にする

次のような無線機器の使用が禁止された区域では、本体の Bluetooth® 通信を OFF にしてください。


- ・ 航空機に乗るとき
- ・ 病院にいるとき
- ・ 海外にいるとき

通信を OFF にするには

1 測定データが表示されている状態で、ボタンを長押しする



※表示は「目標達成度」画面です。

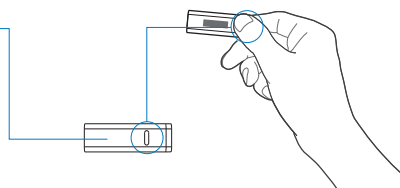

⇨ OFF?

「⇨ OFF?」画面が表示されます。

参考

「⇨ OFF?」画面でボタン操作をしない状態がしばらく続くと、通信 OFF はキャンセルされます。

2 もう一度ボタンを押す

⇨ OFF

「?」が消え、「⇨ OFF」画面が表示されたら、通信 OFF 完了です。

参考


通信を OFF にした後も測定は継続されています。

通信を ON するには

1 本体画面に何も表示されていない状態でボタンを長押しする


参考

ボタン操作をしない状態が 5 秒以上続くと画面の表示が消えます。「省電力機能について」(→ 30 ページ)

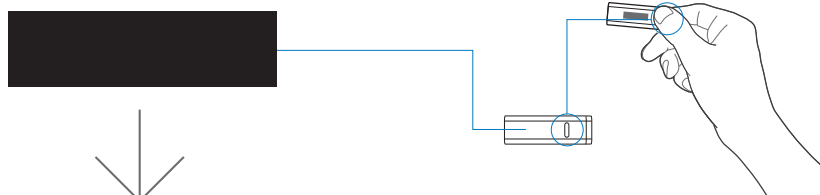



「？」画面が表示されます。

参考


「？」画面でボタン操作をしない状態がしばらく続くと、通信 ON はキャンセルされます。

2 もう一度ボタンを押す

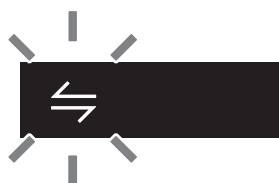

「？」が消え、本体画面に「」が表示されたら、アプリを起動してください。

アプリ起動後、「設定」から「機器との通信確認」を選択し、「開始する」ボタンをタップしてください。

「 OK」画面が表示されたら、通信 ON 完了です。

本体をリセットする

次のときは本体をリセットし、もう一度起動してください。

- ・ 本体画面にエラー「Err」が表示されたとき
- ・ ボタンを押しても本体が動かないとき

本体を USB 充電クレードルにセットした状態で、ボタンを 10 秒押してください。



お知らせランプが点灯し、ボタンを離すと本体がリセットされます。

リセット後は、電源が OFF になります。ボタンを押して本体を起動してください。

本体画面に「今」が表示されたら、アプリを起動してください。

アプリ起動後、「設定」から「機器との通信確認」を選択し、「開始する」ボタンをタップしてください。

「✓ OK」画面が表示されたら、本体のリセットは完了です。

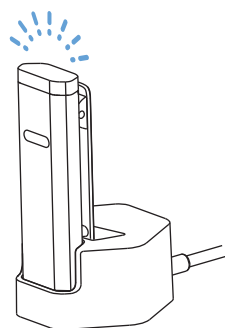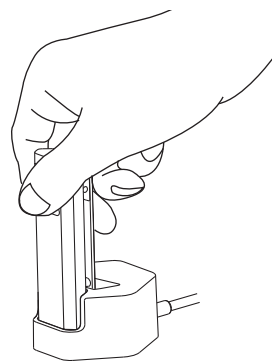

重要 ✓

- ・ 本体をリセットしても、測定データは消えません。
- ・ リセットをしても解決しないときは、オムロンお客様サービスセンターに修理を依頼してください。
(→ 48 ページ)

廃棄について

本体に使用しているリチウムポリマー電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。本体を廃棄するときは、リチウムポリマー電池の残量をなくしたあと取り外し、お買い上げの販売店またはリチウムポリマー電池のリサイクル協力店へお持ちください。




Li-ion 00

電池の取り出し方

1 電池残量を確認する

電池を使い切り、ボタンを長押ししても画面に何も表示されないことを確認します。

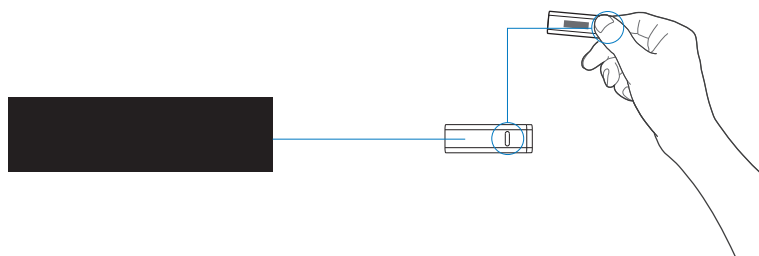


重要 ✓

- 完全に動作しなくなることを確認してから分解してください。
- 修理用の手順ではありません。分解後の修復はできません。


2 本体底のシールをはがす

マイナスドライバーなどを使用し、本体底のシールをはがします。

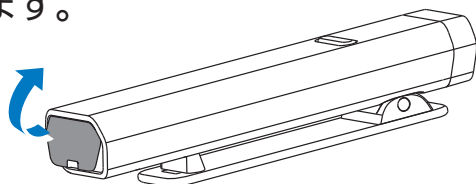

3 本体カバーをこじ開ける


マイナスドライバーなど先端の平たいものを、本体底の差し込み口に差しして、回して本体カバーをこじ開けます。

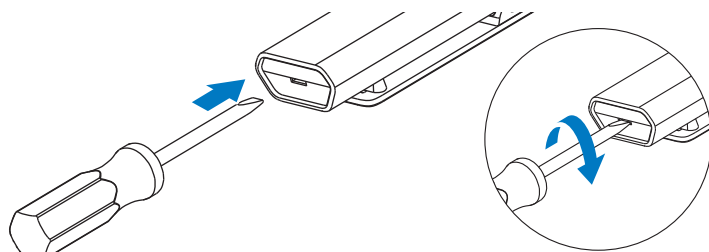

重要 ✓

本体カバーをこじ開けるときは、けがをしないようにご注意ください。


4 マイナスドライバーなどを充電機の下に挿し込み、充電機を取り外す

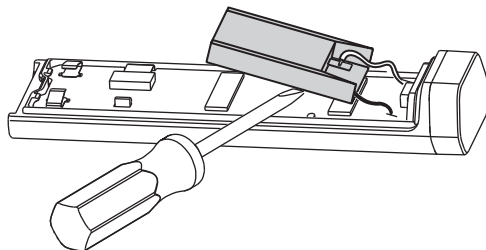


重要 ✓

充電機は粘着力が強いテープで貼り付けられています。電池を取り外すときは、けがをしないようにご注意ください。

5 黒リード線 1 本を切断し、切断したリード線の先端をテープなどで覆う

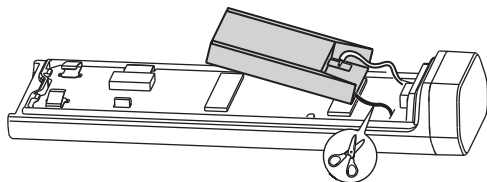

6 赤リード線 1 本を切断し、切断したリード線の先端をテープなどで覆う

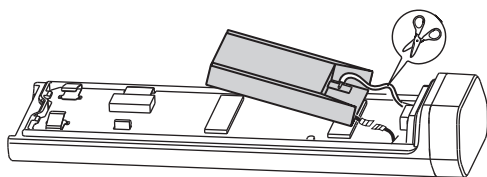

重要 ✓

- ・ ショートを防ぐためにリード線を一本ずつ切断し、リード線の先端をセロハンテープなどで覆ってください。
- ・ 充電電池の液漏れや発熱によるやけどには注意してください。
- ・ 部品の角などで、けがをしないように注意してください。
- ・ 本体、USB 充電クレードルの廃棄方法は、お住まいの各都道府県や市町村の指導に従ってください。

お手入れと保管

お手入れについて

本体／USB 充電クレードルの汚れは乾いたやわらかい布で拭き取って、いつも清潔にしてお使いください。汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤をしみこませてよく絞ったやわらかい布で、拭き取り、から拭きしてください。

本体の充電端子部が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりするので、乾いた綿棒などで時々拭いてください。また、清掃するときは、充電端子部が破損しないように十分ご注意ください。

重要 ✓ 本体内部に水などが入らないようにしてください。

お手入れと保管の注意

汚れを落とすとき、ベンジン、シンナー、アルコールなどを使用しないでください。次のようなところに保管しないでください。



- ・ 水のかかる場所
- ・ 高温・多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受ける場所
- ・ 傾斜、振動、衝撃のある場所
- ・ 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生する場所

乳幼児の手の届かないところに置いてください。


長期間ご使用にならない場合は、過放電による電池劣化防止のため、2 ヶ月に 1 回は充電をしてください。

※上記の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。

おかしいな?と思ったら

こんなとき	原因	対処のしかた
充電できない	接続先のパソコンを起動していない	接続先のパソコンを起動してください
	USB 端子が正しく差し込まれていない	USB 端子を正しく差し込んでください 「充電する」 (→ 17 ページ)
	室温が充電できない温度になっている	5℃以上、35℃以下の室温で充電してください
	USB 充電クレードルに本体が正しく差し込まれていない	USB 充電クレードルからいったん外し、もう一度差し込んでください 「充電する」 (→ 17 ページ)
	繰り返して使用したことによる充電電池の寿命が考えられます※充電電池の交換はできません 「廃棄について」(→ 35 ページ)	
本体と USB 充電クレードルがあたたかい	商品の特性上少しあたたかくなる	故障ではありません また本商品の寿命にも影響ありません

おかしいな?と思ったら

こんなとき	原因	対処のしかた
何も表示しない	省電力状態になっている	ボタンを押してください 「省電力機能について」 (→ 30 ページ)
電池マーク  が表示された	電池残量がなくなった	充電してください 「充電する」 (→ 17 ページ)
「Charge Battery」 が表示された	電池残量が少なくなった	

おかしいな?と思ったら

こんなとき	原因	対処のしかた
使用後に本体を USB 充電クレードルに差し込んでも電池マークが表示されない	USB 端子が正しく接続されていない	正しく接続してください 「充電する」 (→ 17 ページ)
	USB 充電クレードルに本体が正しく差し込まれていない	USB 充電クレードルからいったん外し、もう一度差し込んでください 「充電する」 (→ 17 ページ)
	パソコンを起動していない	パソコンを起動してください
充電しても使用可能時間が短い、動かない	長期間ご使用にならなかったときや使用中に動作が停止したときは、満充電になるまで充電してください 「充電する」(→ 17 ページ) このとき、USB 充電クレードルに本体が正しく差し込まれていることを確認してください	
	寒い場所でのご使用は、使用可能時間が短くなる場合があります	

おかしいな?と思ったら

こんなとき	原因	対処のしかた
充電しても使用可能時間が短い、動かない	繰り返して使用したことによる充電電池の寿命が考えられます※充電電池の交換はできません「廃棄について」(→ 35 ページ)	
iPhoneの「設定」-「Bluetooth」内のデバイス一覧に機器が表示されない	アプリをダウンロードしていない	アプリをダウンロードしてください iPhoneの「設定」からBluetoothを「ON」にした後、アプリを起動し機器登録をしてください「iPhoneで設定する」(→ 16 ページ)
測定を開始しない	iPhoneで機器登録をしていない	
	電池残量がなくなった状態から満充電になるまで充電した	アプリと通信してください「電池残量がなくなった場合のお願い」(→ 21 ページ)
実際の活動と測定表示が合わない / 表示の値がちがう	iPhoneで設定したときに入力した値が間違っている	健康サポートサービスのサイトへログインし、会員情報からプロフィールの変更を行なってください
	装着方法が間違っている	「装着する」をご覧ください(→ 22 ページ)
	不規則な動きをしている	「活動を正しく測定できない場合」をご覧ください(→ 24 ページ)

おかしいな?と思ったら

こんなとき	原因	対処のしかた
階段上り 歩数の値 がちがう	気圧・温度が不安定な環境である	「階段上り歩数を測定できない場合」をご覧ください(→ 25 ページ)
エラー 「Err」が表示された	動作異常が起きた	本体をリセットしてください 「本体をリセットする」 (→ 34 ページ)
ボタンを押しても本体が動かない		それでも解決しないときは、オムロンお客様サービスセンターに修理を依頼してください (→ 48 ページ)
「Check APP」が表示された	一定期間以上、通信していない	アプリと通信してください「アプリと通信する」 (→ 31 ページ)
	アプリと通信して欲しいとき	

おかしいな?と思ったら

こんなとき	原因	対処のしかた
データ通信を開始しない	他の iPhone に設定されている	iPhone と本体を再設定してください「iPhone で設定する」の手順 4 (→ 16 ページ) からやり直してください
	アプリが起動していない	アプリをインストール、または起動してください「iPhone で設定する」の手順 4 (→ 16 ページ)
	本体の通信が OFF になっている	本体の通信を ON にしてください「通信を OFF/ON にする」(→ 32 ページ)
	強い磁力や電波の発生するものの近くでデータ通信をした	電波の影響を受けない場所で、もう一度データ通信をおこなってください
データ通信中にエラー表示が出た		アプリ画面の表示を確認し、指示にしたがってください

「おかしいな?と思ったら」に記載している対処方法でも直らない場合、本体についてはオムロンお客様サービスセンター、アプリについてはサポートデスクまでお問い合わせください。(→ 48 ページ)

参考 

本商品の故障、修理のときは、設定した値と記録した測定データはすべて消去されます。万一に備え、こまめにアプリを起動し、データ通信しておくことをおすすめします。


別売品について

別売品のお求めは、
オムロン お客様サービスセンター（☎電話 0120-30-6606）
までお問い合わせください。

次の別売品をご用意しています。

・ USB 充電クレードル

型式：HHX-CABLE-U42

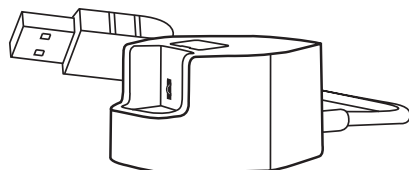


参考

本商品に付属しているものと同じです。

・ AC アダプタ

型式：HT-B601-AC

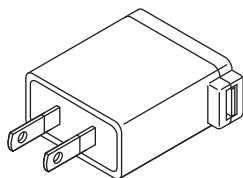

重要

上記別売品以外の AC アダプタは使用しないでください。

仕様

販売名	オムロン 活動量計 HJA-700T アクティブシフト エッジ	
測定機能	歩数、早歩き歩数、総消費カロリー、距離、階段上り歩数 (10 歩単位)	
使用電池	充電式リチウムポリマー 2 次電池 (48 mAh)	
充電時間	約 3 時間 (パソコンの USB ポートから充電した場合)	
使用可能時間	約 5 日間 *1 (満充電時、当社試験条件による)	
通信方式	Bluetooth® Version 4.0 (Low Energy support)	
通信距離	約 10m*1	
表示	時刻	0:00 ~ 23:59
	総消費カロリー	0 ~ 59,999kcal
	歩数	0 ~ 999,999 歩
	階段上り歩数	0 ~ 999,990 歩
	早歩き歩数	0 ~ 999,999 歩
	距離	0.0 ~ 999.9km
	体重	10.00 ~ 136.00kg
	イニシャル *2	英大文字、数字を含む 3 文字
	データ通信後、パソコンで健康サポートサービスにログインしていただくと、上記以外の測定データも確認できます。	
メモリ	本体記録メモリ	最大 14 日分
	本体で確認できる測定データは当日分のみです。*3	

*1 使用可能時間、通信距離は、通信機器間の距離や障害物、電波状況、お使いの機器の使用状況などにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。

*2 本体画面にイニシャルが表示されます。アプリで登録した情報が本体に自動転送されます。※本体では設定できません。

*3 過去の測定データはアプリや健康サポートサービスで確認できます。
 ※アプリでは階段上り歩数はご覧いただくことができません。
 ※健康サポートサービスでは階段上り歩数、早歩き歩数はご覧いただくことができません。

使用環境	温度：-10～+40℃ 充電時／データ通信時：+5～+35℃ 湿度：30～85% RH 気圧：600～1050hPa
外形寸法	本体（クリップ部含む）： 縦約60.5×横約19×厚さ約13.5 mm USB充電クレードル： 縦約40×横約40×厚さ約22 mm
質量	本体：約13 g USB充電クレードル：約25 g
付属品	USB充電クレードル、クイックガイド、 安全上のご注意（品質保証書付き）

お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

お問い合わせ

オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

修理・商品に関するお問い合わせ／
別売品・消耗部品のお求めは

オムロン お客様サービスセンター

TEL 通話料
無料 0120-30-6606

FAX 通信料
無料 0120-10-1625

受付時間（祝日を除く月～金）9：00～19：00

都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただく場合があります。

ホームページ

<http://www.healthcare.omron.co.jp/>

通信料はお客様ご負担となります。（別売品・消耗部品はインターネットでもお求めいただけます。）

健康サポートサービスに関するお問い合わせは

サポートデスク

<http://wellnesslink.jp/support/>

お問い合わせの内容により、回答までにお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。